

Kan alkalama Cihazı

Model CM735



-Alınan kan istenilen hacme geldiđi zaman alkalama tepsisi otomatik olarak klamplenir. İstenilen hacim kullanıcı tarafından seilebilir.

-alkalama kan torbasında bulunan antikoagülanlar ile alınan kanın karışması içindir.

-LCD panelde alarm işaretleri,kan alımı için geçen süre,kan ve kan torbasının toplam ağırlığı ,alım için önceden belirlenen kan hacmi ve alınan kanın hacmi görüntülenir.

-Anormal bir kan akışı olması durumunda, batarya zayıfladığında ve kan alım işlemi bittiğinde görüntülü ve sesli alarm verir.

-Dörtlü kan torbasına kadar alabilecek genişlikte tepsisi vardır..

-Alınan kanın net hacminin hesaplanması için otomatik olarak kan torbasının darası ölçümden düşülür.

-Klamp modülü ayrılabilir ve sol ya da sađ tarafa eklenebilir.

-Deđiştirilebilen ve şarj edilebilen bataryası sayesinde tamamen portatiftir.

-Cihazın içindeki şarj ve bunun dışında bir şarj aleti daha üniteye dahildir.

-Kanvas taşıma antası dahildir.

-Hafif olması, şarj edilebilmesi ve taşıma antası ile kolay taşınabilir bir cihazdır.

Kontrol Paneli



Görüntü Ekranı



İşlem Sırası

İstenilen hacim ayarlanır.
Başlatma işlemi hazırlanıyor



Kan torbası yüklenir
Torba ağırlığı ekranda
görünür



START tuşuna basılır.
0 ml den hesaplama
işlemi başlar.

Yeni işlem için



İstenilen hacme ulaşıncı
klamp kapanır

Alım işlemi devam
ederken
hacim ekranda görünür

Yedek Ekran



Alarm ekranı



Geçen süre ekranı

Değiştirilebilir şarj kutusu



Klamp modülü sağ yada sol yana eklenebilir



Tepsi çıkarıldıktan sonra cihaz
taşıma torbasına yerleştirilebilir.

Kan Çalkalama Cihazı CM 735 'in Özellikleri

1-Alınan Kan Hacmi	: 0-999 ml, 1 ml lik adımlarla
2. Toplam ağırlık Ekranı	: 0-999 gram, 1 gramlık adımlarla
3.Geçen süre ekranı	: 0- 19 dakika 59 saniye
4.İstenilen hacmin ayarlanması	
-Oran	: 0-995 lml, 5 ml lik adımlarla
-Ayar metodu	: Yukarı,Aşağı ve hacim ayarlama tuşları
-Ayarlanan hacim miktarı:	350,400,450,500 ml(isteğe göre değişebilir)
-Varsayılan miktar	:450 ml(isteğe öre değişebilir)
5.Alarm	:Zayıf batarya, düşük akış(30ml/min),uzun süreli alım,tepsi hatası
6.Çalkalama tepsi	: 36 devir/min,+/-12,5°
7.Doğruluk	:Toplanmış hacimde -0 +- 3 ml,toplam ağırlık:-0-+3gram
8.Kontrol	:GÜÇ,BAŞLAMA,BİTİŞ,ZAMAN,KLAMP,HACİM AYARLAMA,YUKARI,AŞAĞI
9.Gösterge Paneli	: LCD ekran
10.Güç Kaynağı	: Batarya kutusu ya da AC güç adaptörü
11.AC güç adaptörü	: 100-120/220-240 VAC, 18 VDC/1 Amp
12.Batarya kutusu	:Ni-Cd, 12 VDC/2 AH
13.Şarj bataryası	:Cihaz içindeki şarj ve ayrı bir adet daha şarj
14.Harcanan güç	:2W
15.Ebat	: W 203 x H 140 x D 292 mm (W 8.0" x H 5.5 x D 11.5")
16. Ağırlık	: 3,2 kg (7.0 lb)
17.Sıcaklık-Depolama işlemi	: 0-40 C (32-14, F) -20 - 70 C (-4 -158 F)

Aksesuarlar



Batarya kutusu



Şarj



Güç adaptörü



Taşıma çantası

İsteğe Bağlı Parçalar



Şarj Bataryası BC142

- 10 saat standart şarjlı 4 şarj batarya kutusu
- Sadece cihaz için kullanılan duvardaki priz sayısını azaltmak amacıyla yöneliktir
- Portatif kullanım için aynı anda pek çok yedek batarya hazırlamak amacıyla kullanılır.



Şarj Bataryası BC 162

- Aynı anda 6 batarya kutusu şarj edilir
- Hızlı şarj ile 1 saatte 1 kutu,5 kutu ile standart zamanda olan şarj
- Kullanılmış batarya paketini tazeleyen, kusursuz tahliye(deşarj) özelliği